

Información del producto Navina Smart

Descripción del producto

Sistema de irrigación transanal con unidad de control electrónica.

Vida útil y usos

Todos los componentes del sistema de irrigación Navina tienen una vida útil de 3,5 años, excepto las sondas Navina y el cono Navina, que tienen 2 años. Cuando los componentes de Navina se empaquetan en conjuntos, el componente con vida útil más corta determina la vida útil del conjunto.

Tenga en cuenta que la unidad de control de Navina Smart también tiene una "fecha de carga" establecida en 1,5 años a partir de la fecha de fabricación.

Los catéteres y conos Navina son de un solo uso, el contenedor de agua tiene 15 usos, el juego de tubos tiene 100 usos y la unidad de control Navina Smart 400 usos o dos años a partir de la fecha del primer uso.

Composición del material

Material de la sonda: estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS)/ polipropileno (PP) con revestimiento de polivinilpirrolidona hidrófila (PVP).

Material del embalaje primario: Bolsa de PE/PET.

Material del embalaje secundario: cartón y cartón corrugado.

Uso previsto

Los Navina Systems están indicados para la irrigación transanal mediante la instilación de agua hasta la parte inferior del colon a través de una sonda rectal.

Indicaciones de uso

Los Navina Systems están indicados para ayudar a adultos y a niños mayores de 3 años que sufren de incontinencia fecal, estreñimiento crónico y/o un manejo intestinal en el que invierten mucho tiempo. Al instilar agua en la parte inferior del colon, se pueden activar los músculos peristálticos en el intestino y comenzar a evacuar el contenido del colon inferior y el recto.

Contraindicaciones

NO utilice Navina Systems si cumple uno o varios de los siguientes requisitos:

- Estenosis anal o colorrectal conocida
- Enfermedad intestinal inflamatoria activa
- Diverticulitis aguda
- Cáncer colorrectal
- Colitis isquémica
- No han pasado tres meses desde una cirugía anal o colorrectal.
- No han pasado 4 semanas desde una polipectomía endoscópica anterior.

Puesto que la lista puede no ser exhaustiva, los profesionales sanitarios siempre tendrán en cuenta, además, los factores individuales del usuario.



Navina Smart System

Referencia	Tipo	Especificación
6900980 6901080 6901980	Navina Smart System Regular Navina Smart System Small Navina Smart System Cono	1 Unidad de control de Navina Smart 1 Adaptador de alimentación 1 Cable 1 Contenedor de agua 1 Conjunto de tubos 2 Sondas rectales 1 Funda de Navina 1 Conjunto de accesorios
6900380	Conjunto de consumibles Navina Regular	1 Contenedor de agua
6900480	Conjunto de consumibles Navina Small	15 Sondas rectales
6901680	Conjunto de consumibles Navina Conos	
6894080	Conjunto de sondas Navina Regular	10 Sondas rectales
6894380	Conjunto de sondas Navina Small	
6901180	Conjunto de tubos Navina	1 Tubo de sonda 1 Tubo de contenedor de agua
69012	Accesorios Navina	2 Anillos de sujeción (1 vertical, 1 horizontal) 1 Cordón 1 Tira de colocación 1 Clip de colocación de Navina Smart
6901480	Unidad de control de Navina Smart	1 Unidad de control Navina Smart 1 Adaptador de corriente 1 Cable

Navina™ Smart

